

Kit Tasso

Instrucciones de uso

Solo para uso en investigación.
No debe usarse en procedimientos de diagnóstico.

PROPÓSITO PREVISTO

Permite la autorrecolección de muestras de sangre capilar junto con un depósito de recolección de muestras compatible que se envía a un laboratorio acreditado para su análisis. Solo para uso en investigación. No se debe usar en procedimientos de diagnóstico.

DESCRIPCIÓN DEL KIT

El Kit Tasso+ es un kit que incluye el dispositivo Tasso+ y todos los suministros necesarios para recoger una muestra de sangre. El dispositivo Tasso+ es un dispositivo de punción de sangre estéril y desechable. Al recolectar una muestra, el dispositivo se sujeta sobre la piel mediante un adhesivo suave. Una lanceta estéril perfora la piel con solo presionar el botón, y al mismo tiempo crea un ligero vacío que ayuda a que la sangre capilar fluya por gravedad hacia un tubo compatible. Después de un período de tiempo predefinido, o cuando el tubo está lleno, el dispositivo se retira de la piel. El tubo se retira y se tapa para su transporte. La lanceta es de un solo uso y se retrae automáticamente en el dispositivo en una posición segura después de su uso.



¿Es la primera vez que utiliza Tasso?
Escanee el código QR para acceder
o mire nuestro vídeo explicativo:
www.laboratoriobarba.es/tassoplus-video

Póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda: **91 364 58 35**

CONTENIDO DEL KIT

- Dispositivo de punción de sangre Tasso
- Tubo compatible, consulte la etiqueta del fabricante
- Compresa caliente
- Venda
- Hisopo con alcohol
- Bolsa de retorno con almohadilla absorbente
- Instrucciones de uso

ELIMINACIÓN

Siga las directrices locales para desechar objetos punzocortantes usados como material de riesgo biológico.

- Longitud máxima: 5 mm
- Profundidad máxima: 2 mm

ADVERTENCIAS

No está diseñado para más de un uso. No usar en más de un paciente. El uso inadecuado de lancetas sanguíneas puede aumentar el riesgo de transmisión inadvertida de patógenos transmitidos por la sangre, especialmente en entornos donde se realizan pruebas a varios pacientes.

PRECAUCIONES

- Para uso exclusivo de una sola patente. Deseche todo el dispositivo después de su uso.
- No lo use después de la fecha de vencimiento.
- Para un solo uso, únicamente.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Pueden aparecer hematomas menores o marcas residuales en el sitio de recolección de muestras.
- No lo vuelva a esterilizar.
- Sólo para uso externo.
- Úselo mientras está sentado, ya que puede producirse un desmayo con cualquier procedimiento de muestreo de sangre.
- No se debe usar en los talones de los bebés.
- Consulte las instrucciones del fabricante para conocer cada componente. No lo use si la bandeja se ha abierto o dañado.
- Use equipo de protección personal para manipular materiales biopeligrosos.



REF N° de catálogo

LOT N° de lote

! Fecha de caducidad

⌘ Para un solo uso, únicamente

! Almacene a 18 - 25°

🚚 Transporte al 25 - 85% de HR

i Consulte las instrucciones de uso

⚠ Contiene objetos punzocortantes

⊘ No lo utilice si el embalaje está dañado

SR Esterilizado mediante irradiación

⌘ No lo vuelva a esterilizar

